

# Invacare® Patientengurte (bzw. Körperstützsysteme)

## Checkliste zur Sicherheitsinspektion



Modell:	Art.-Nr. / Seriennummer:
---------	--------------------------

### WICHTIG!

- Sofern es die lokalen Anforderungen nicht anders vorsehen, muss mindestens alle 6 Monate eine regelmäßige Sicherheitsinspektion gemäß ISO 10535 Anhang B am Patientengurt (bzw. Körperstützsysteme) durchgeführt werden.
- Die Inspektionen müssen von einer qualifizierten Person vorgenommen werden, die mit dem Design, der Verwendung und der Pflege der Patientengurte vertraut ist.
- Das Prüfprotokoll ist zur Überprüfung im Falle eines Vorkommnisses aufzubewahren.

Kontrollpunkte für Invacare Patientengurte gemäß ISO 10535:2006 Anhang B	✓	✗	Kommentar / Instandgesetzt (Datum)
<b>Überprüfung der Typenschilder</b>			
<b>Führen Sie eine Überprüfung durch, um die Lesbarkeit folgender Daten sicherzustellen:</b>			
Max. Tragfähigkeit und Größe			
Seriennummer und Referenznummer			
Herstellungsdatum			
Waschanweisungen			
<b>Überprüfung der Aufhängebänder</b>			
Führen Sie eine Überprüfung durch, um Anzeichen von Schäden oder Verschleiß wie zum Beispiel Löcher, Risse, lose Fäden, Ausfransen, Farbveränderungen oder Steifigkeit ausschließen zu können:			
Aufhängebänder und Schlaufen			
Nähte der Schlaufen und Befestigungspunkte am Stoff			
<b>Überprüfung des Stoffes und anderer Komponenten</b>			
Führen Sie eine Überprüfung durch, um Anzeichen von Schäden oder Verschleiß wie zum Beispiel Löcher, Risse, lose Fäden, Abnutzungen oder Änderungen hinsichtlich Farbe und Steifigkeit ausschließen zu können:			
Stoff und Paspelband			
Griffe und Taschen (falls vorhanden)			
Gurte und Schnallen (falls vorhanden)			
<b>Allgemeine Prüfpunkte</b>			
Stellen Sie sicher, dass keine sichtbare Reparaturen vorgenommen wurden und keine Knoten, Klebebänder, Nadeln oder sonstige Methoden zur Änderung der Form oder Größe des Patientengurts verwendet wurden.			
Vergewissern Sie sich, dass der Patientengurt sauber ist.			
Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung zugänglich ist.			
Falls Zubehör vorhanden, überprüfen Sie, dass keine Anzeichen von Schäden oder Verschleiß vorliegen, und ersetzen Sie es, wenn Mängel festgestellt werden.			

### Gesamteinschätzung

#### Bestanden

Keine sicherheitstechnischen oder funktionalen Fehler festgestellt.

Datum der nächsten Wartung:

Ort:

Datum:

#### Nicht bestanden

Es wurden Sicherheits- oder Funktionsmängel festgestellt.

Kommentar:

Name:

Unterschrift:

**WICHTIG! Wenn Sicherheits- oder Funktionsmängel festgestellt werden, darf der Patientengurt nicht mehr verwendet werden und muss entsorgt werden.**